

VOTRE MEILLEUR ALLIÉ CONTRE LES AES*:

OPRAGARD®

Collecteurs d'aiguilles / Supports et plateaux
Conformes à la norme AFNOR NF X 30-500 et à l'homologation ADR

ADOPTEZ LES BONS GESTES

■ **Le collecteur doit être monté correctement pour être bien utilisé**

Déposez le couvercle sur un plan de travail, puis présentez le collecteur à l'envers. Appuyer fortement en croisant les mains. Le couvercle est fixé !



■ **La taille du collecteur doit être adaptée au volume des déchets à éliminer**



■ **Pour plus de stabilité Il faut positionner le collecteur sur un support adapté à vos besoins** (mural, chariot, incliné, MOVIX ou plateau) **permettant ainsi l'évacuation mono-manuelle du matériel**




■ **Pour éviter tout risque de contamination, bien respecter la limite de remplissage**
Elle ne doit jamais être dépassée !




■ **Bien refermer le collecteur après utilisation**

Pour une fermeture temporaire, une légère pression sur le point 1 de l'opercule.
Pour une fermeture définitive, exercez une pression forte sur les points 1, 2, et 3 de l'opercule.

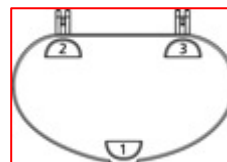

■ **La préhension est sans danger par le dessus ou en utilisant la poignée pour un transport aisé du collecteur.**

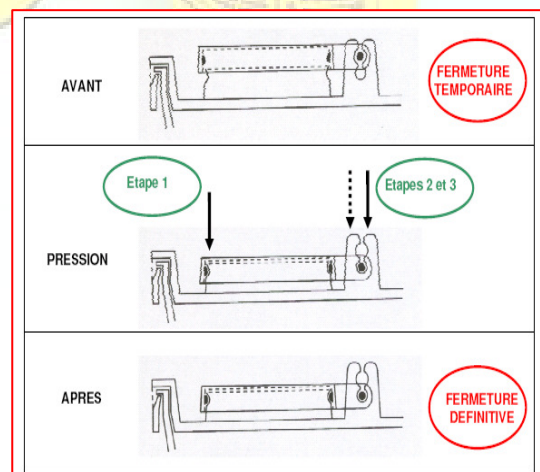

* Accidents d'Exposition au Sang